




## Anleitung zum Rachenabstrich

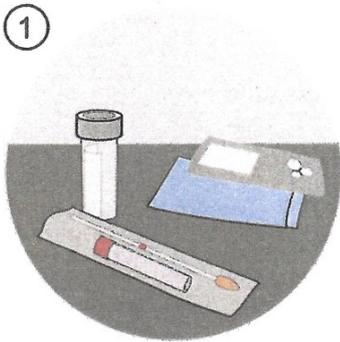


① Inhalt: 1x Anforderungsschein, 1x Rücksendeumschlag, 1x Testset mit Probenröhrchen (roter Deckel) und Stäbchen, 1x Verpackungsröhrchen (weißer Deckel).

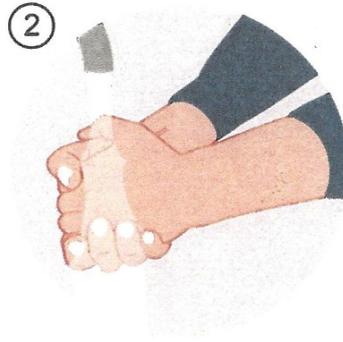


② Hände desinfizieren oder gründlich mit Seife waschen.

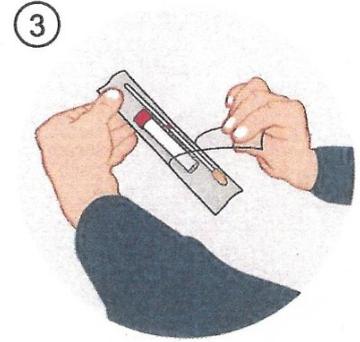


③ Öffnen Sie das Testset. Entnehmen Sie das Probenröhrchen (roter/oranger Deckel) und öffnen Sie es. Achtung: Nicht schief halten, das Röhrchen kann mit Flüssigkeit gefüllt sein.

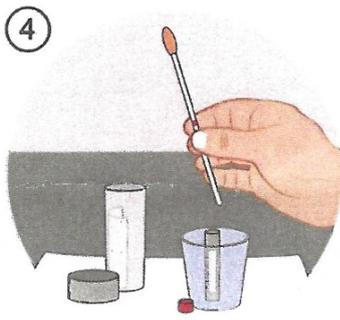


④ Stellen Sie das Probenröhrchen in ein Glas und legen Sie den Deckel auf ein Papiertuch. Entnehmen Sie dem Testset das Stäbchen.

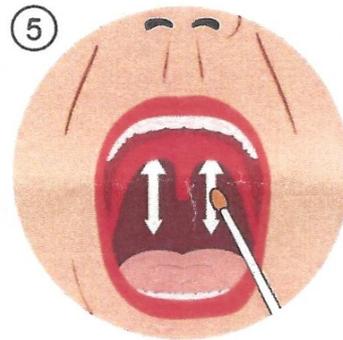


⑤ Abstrich am besten vor dem Spiegel durchführen. Führen Sie das Stäbchen tief in den Rachen ein – hinter das Zäpfchen. Reiben Sie die Tupferspitze mit etwas Druck an der Hinterwand des Rachens.

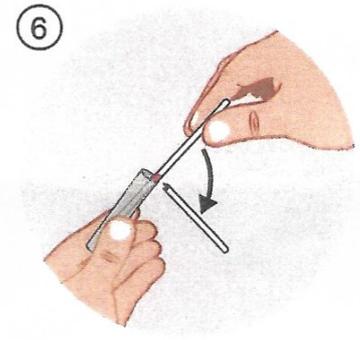


⑥ Stecken Sie das Stäbchen in das Probenröhrchen. Knicken sie den überstehenden Teil des Stäbchens an der roten Sollbruchstelle ab.

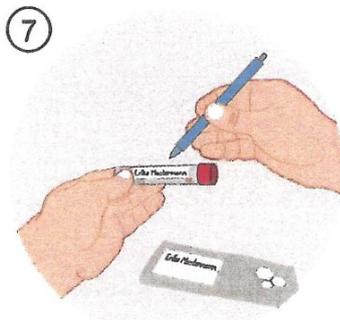

⑦ Schrauben sie den Deckel auf das Probenröhrchen und beschriften Sie es (ggfs. mit Barcode-Aufkleber).

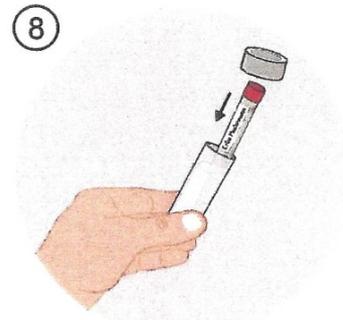

⑧ Stecken Sie das Probenröhrchen in das Verpackungsröhrchen (weißer Deckel) und schrauben sie es zu.

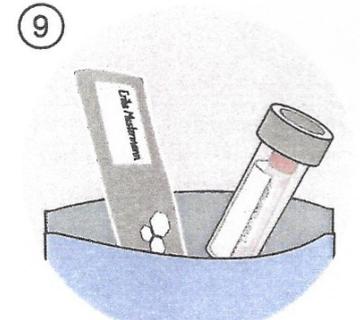

⑨ Geben Sie das Verpackungsröhrchen mit dem ausgefüllten Anforderungsschein in den Rückumschlag und verschliessen sie ihn.